


Comment utiliser son masque chirurgical ?

Bordeaux INP
AQUITAINE

DE TYPE II (FILTRATION BACTÉRIENNE SUPÉRIEUR À 98%)



A Se nettoyer les mains avant de toucher un masque chirurgical, avec du savon et de l'eau ou, à défaut, du gel hydro-alcoolique.

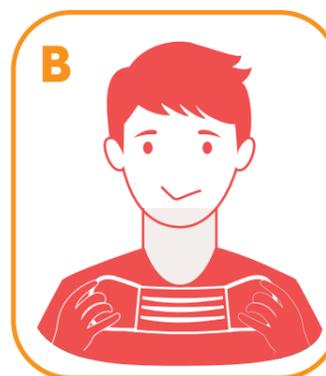

B Sortir le masque "en ne touchant que les élastiques" et le vérifier. S'assurer qu'il ne présente pas de défaut ou de déchirure. Identifier les faces interne (face blanche) et externe (face bleue).



C Placer le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton (bord rigide vers le haut). Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher la partie centrale du masque.

Pincer/modeler la partie haute du masque, au niveau du nez, ce qui permet de le rendre hermétique. Si le menton n'est pas déjà couvert, attraper le bas du masque puis le tirer pour couvrir le menton.



E Pour retirer le masque :
1. Se nettoyer les mains.
2. Le retirer toujours par les élastiques.
3. Ne pas toucher la partie qui couvre la bouche et le nez ou la partie frontale.
4. Se nettoyer les mains à nouveau.

Tout masque usagé doit être jeté dans les poubelles dédiées présentes à la sortie des bâtiments.



UNE FOIS QUE LE MASQUE EST BIEN EN PLACE, IL NE FAUT JAMAIS TOUCHER LA PARTIE FILTRANTE AVEC LES MAINS



EN CAS DE RETRAIT PROVISOIRE DU MASQUE, LE DÉPOSER À UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE CONTAMINÉ



LE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIÈRES